

取扱説明書

本製品は『サポートジャケットBb+FIT ケアタイプ』の専用パーツで下記目的のために使用します。

- ・FIT胸部のプラスチック部品が被助助者の顔等に直接当たらないようするため。
- ・FIT装着者の胸部や腹部を目立たなくするため。
- ・装着者の胸部や腹部といった接触部位の負担軽減のため。

本製品について不明な点がありましたら下記問い合わせ先までご連絡ください。

⚠ 注意

- ・この取扱説明書に示した用途以外のご使用はおやめください。
- ・本製品で装着者の首が締まらないよう調整し十分注意してご使用ください。
- ・経年劣化・ほつれ・破れ等が生じた場合はご使用をおやめください。
- ・万が一お肌に合わない場合は使用を中止し専門医へご相談ください。
- ・製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

洗濯方法

- ・水またはぬるま湯で中性洗剤を使用して洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- ・漂白剤・柔軟剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- ・洗濯後の乾燥は陰干しにしてください。
- ・色移りすることがありますのでご注意ください。

保管方法

- ・直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管してください。
- ・高温になる場所での保管は、変形や変色の原因となりますのでおやめください。

使用素材

- ・ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アクリル

廃棄方法

- ・本製品を廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

問い合わせ先

upr ユーピーアール株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2内幸町東急ビル12階
TEL (03) 6852-8932 FAX (03) 3593-3016
E-mail pas@upr-net.co.jp
<https://www.upr-net.co.jp>

使用方法

本製品は『サポートジャケットBb+FIT』に取付けて使います。
本製品だけでは使用できません。

- ①本製品、図1の肩部面ファスナーを、図2のFIT本体の肩ベルト部(図2)に通して、図3のように留めます。



図1



図2

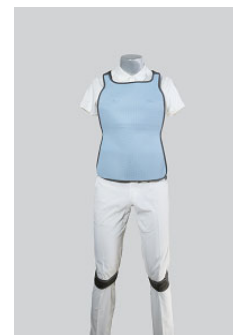


図3

※装着した際に本製品で首が締まる場合は、図2 FIT本体肩ベルトの低い位置で留めてご使用ください。それでも首が締まる場合は、FIT本体のサイズを大きめにするか、本製品のご使用をお控えください。

- ②腰ひもを結びます。ひもが長い場合は身体の前で結ぶ等、調整してください。

- ③装着完了図



前



後